

CHUTE X

ELDER - GILET AIRBAG GUIDE D'UTILISATION



INNOVATION




CHUTE X


Nous vous remercions d'avoir choisi le Gilet Airbag Elder, un dispositif innovant conçu pour offrir une protection optimale contre les risques de chute. Ce produit est le fruit d'une technologie avancée, pensée spécifiquement pour répondre aux besoins des seniors et des personnes en situation de fragilité.

Le Gilet Elder ne se contente pas d'être une simple protection. Il incarne une solution proactive pour vous permettre de conserver votre autonomie tout en réduisant les risques associés aux chutes. Facile à porter, discret, et d'une efficacité éprouvée, il offre une tranquillité d'esprit aussi bien à ses utilisateurs qu'à leurs proches.

Ce guide d'utilisation a été conçu pour vous accompagner pas à pas dans la prise en main de votre gilet. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour maximiser ses performances, garantir votre confort et assurer un entretien optimal.

Ensemble, réinventons la sécurité pour que chaque instant soit vécu en toute sérénité.

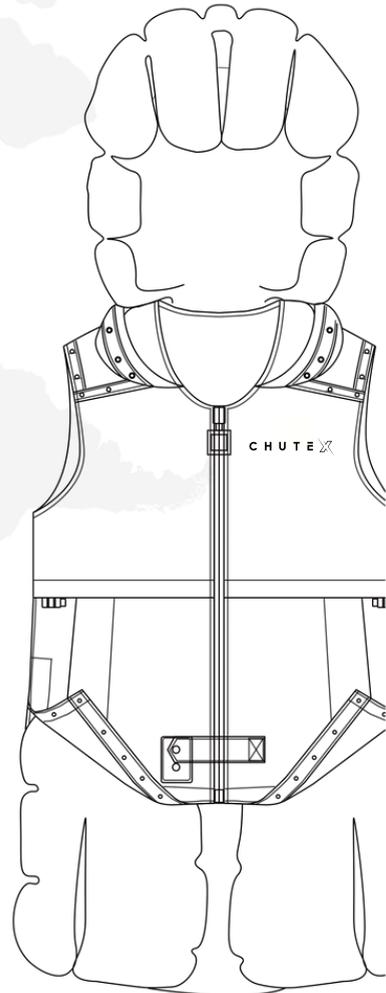

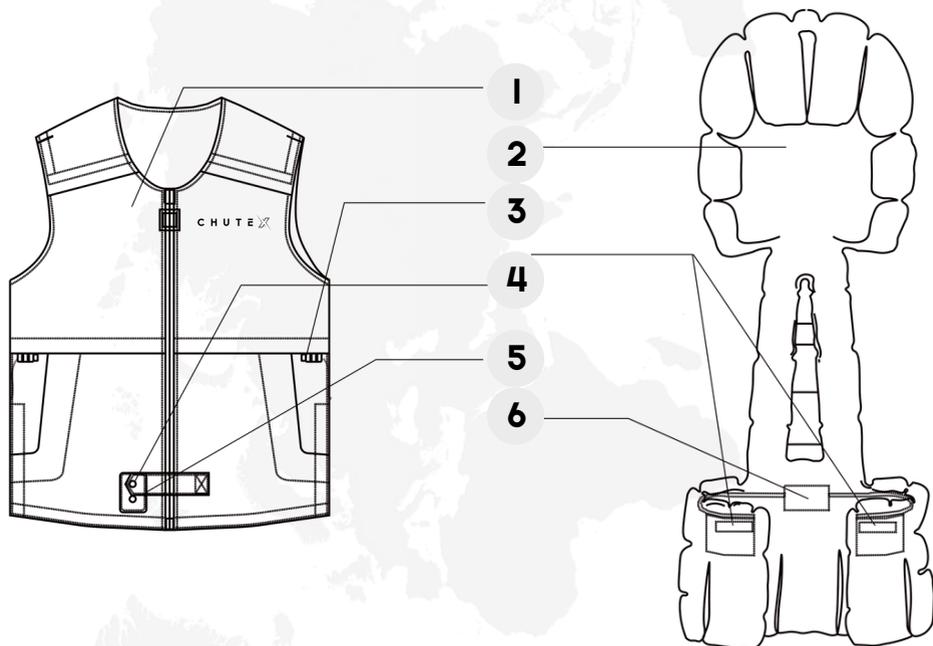

1

Airbag de qualité.

2

Housse résistante à l'usure et lavable.

3

Cordon de réglage abdominal.

4


Déclenchement système airbag.

5

Bouton de d'activation, port de charge.

6

Capteur à puce haute technologie.

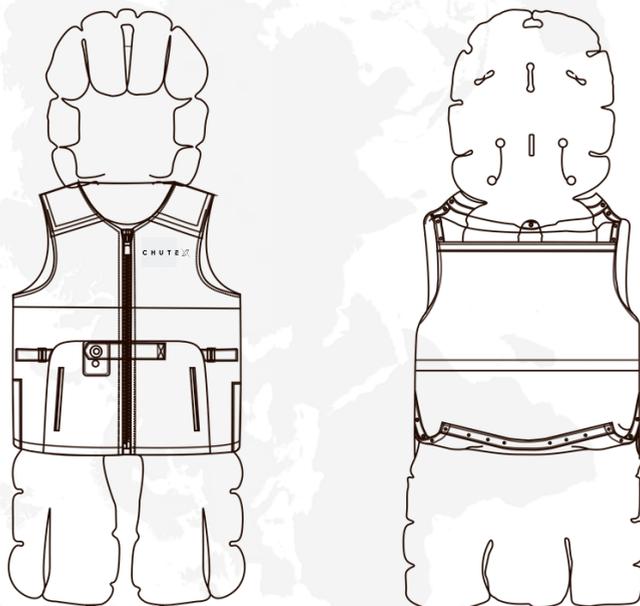

ELDER | GILET AIRBAG



- **Modèle fabricant :** S20
- **Courant de charge :** 2A
- **Voltage de charge :** 110-240V
- **Capacité de batterie :** 5000mAh
- **Recharge système airbag :** 2
- **Temps de charge :** 6H
- **Durée d'utilisation :** 36H
- **Déclenchement :** Automatique



L'ALGORITHME DÉTECTE LA CHUTE ET DÉCLENCHE L'AIRBAG AUTOMATIQUE


Le capteur de l'équipement recueille des données sur l'activité humaine, et des dizaines de millions de tests sur le corps humain forment un algorithme central, qui peut juger si le corps humain est en état d'apesanteur et donner des instructions pour transmettre des signaux au générateur de gaz.

Le générateur de gaz gonflera rapidement le gaz contenu dans le gonfleur comprimé dans l'airbag en l'espace de 0,08 seconde, ce qui aura un effet protecteur.

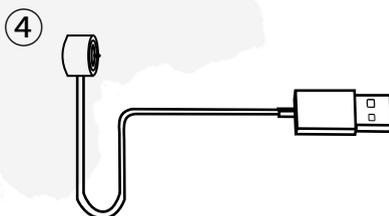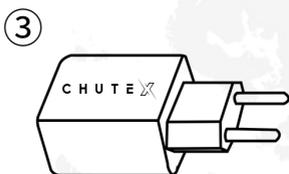

INCLUS À LA LIVRAISON

- Elder - Gilet airbag
- Manuel d'utilisation
- Adaptateur de courant USB
- Câble de recharge USB pour gilet Elder
- 2 cartouches de gaz hélium

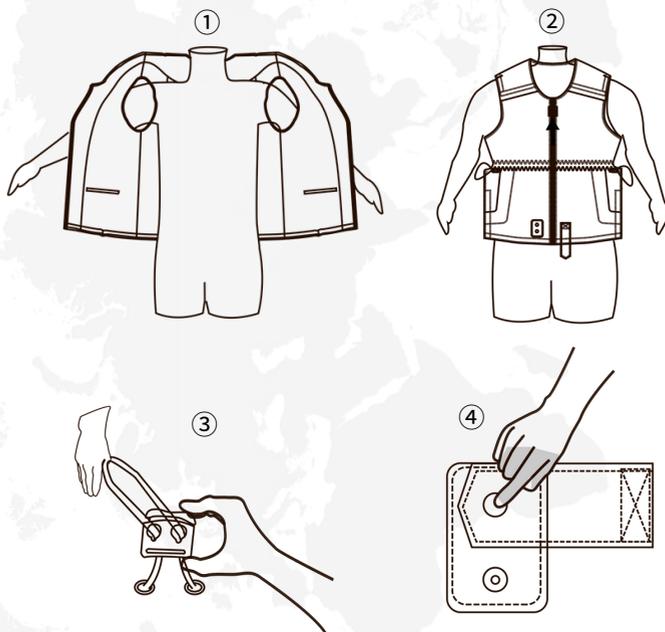

**AJUSTER LE GILET CONFORTABLEMENT -
NE DOIT PAS ÊTRE TROP PRÈS DU CORPS**

ETAPE 1

Enfiler le gilet Elder sur
la personne âgées.

ETAPE 2

Fermer le gilet à l'aide
de la fermeture éclair.


ETAPE 3

Ajuster confortablement le
gilet à la taille.

ETAPE 4

Activer le gilet en
fermant le bouton.

Après avoir enfilé la veste, en s'assurant que vous avez bien bouclé le bouton de connexion, il y aura un test automatique avec toutes les lumières allumées et une musique qui continuera pendant une courte période (environ 10 secondes), et lorsque la musique s'arrête, cela signifie que vous portez la veste correctement, et que le système est en marche.

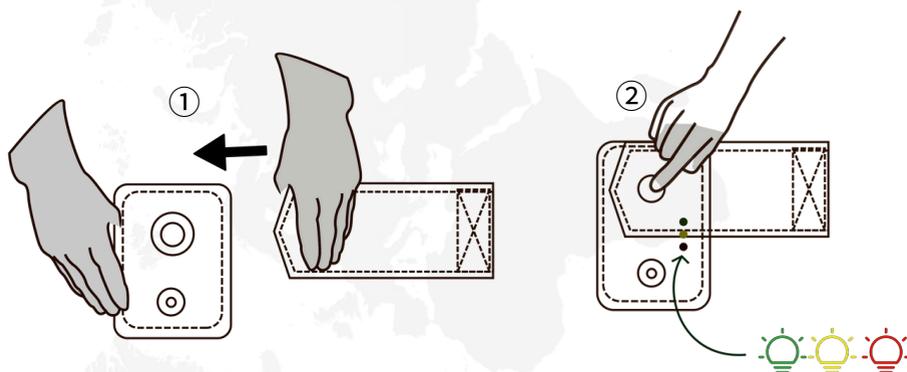**ETAPE 1**

Fermer le bouton d'activation.


ETAPE 2

Attendre la musique de confirmation.

**NOTE IMPORATANTE**

Si vous n'entendez pas la musique de l'auto-test, débouclez la ceinture et rebouclez-la. S'il n'y a toujours pas de musique, veuillez nous contacter.

Veillez à porter la veste à l'extérieur, sans aucun autre vêtement.

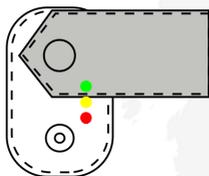


STATUS DE LA BATTERIE

Lumière verte : batterie est chargée à plus de 50 %.


Lumière jaune : batterie chargée entre 10-50%.

Lumière rouge : batterie chargée à moins de 10%

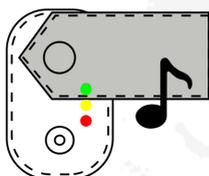


AVIS DE DYSFONCTIONNEMENT

Les voyants rouge, vert et jaune clignotent tous avec un signal sonore lent, ce qui signifie que l'appareil doit être révérifié avant d'être utilisé.

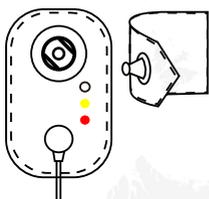

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

une lumière clignotante signifie que l'appareil est en train de se charger (veillez à ne pas appuyer sur le bouton-poussoir pendant le chargement de la batterie). Une lumière rouge, verte ou jaune fixe signifie que l'appareil est entièrement chargé.

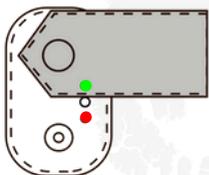


MODE REPOS

Lorsque l'utilisateur s'allonge ou met la veste à plat, le système se met en mode veille, les lumières rouges et vertes seront allumées en même temps.




NOTE IMPORATANTE

- Veillez à ne pas boucler le mousqueton pendant que vous chargez la batterie.
- Vérifiez l'état de la batterie et assurez-vous que l'appareil dispose de suffisamment d'énergie.
- En cas d'avis de dysfonctionnement et de clignotement de tous les voyants, veuillez vérifier les gonfleurs ou nous contacter.

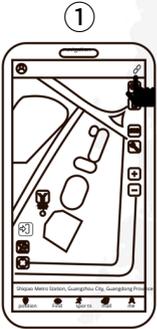


Ouvrir l'application S-AIRBAG / Cliquez sur "Connect device"

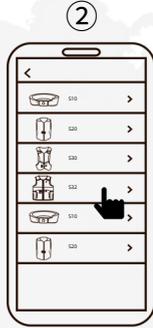

Sélectionner le Gilet S20



Cliquez sur "Wearer"

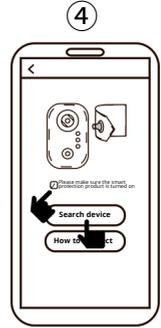

1/ Comment connecter
2/ Cliquez "Search device"



1/ Sélectionnez "S-Sxx-airbag"
2/ Cliquez "Connect"



1/ Remplir les informations
2/ Cliquez "Save"



1/ Connection terminé
2/ Enregistrez le QR-Code




NOTE IMPORATANTE

- Assurez vous que le gilet est porté et activé.
- Assurer vous d'être à moins de 5 mètre du gilet lors de la liaison.
- Notez que l'appareils inital doit se connecter en Bluetooth, liés au porteur et que les autres personnes souhaitant être alerté doivent scanner le code QR généré.



1 Ouvrir l'application S-AIRBAG / Cliquez sur "Connect device"

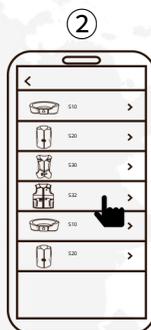

2 Sélectionner le Gilet S20



3 Cliquez sur "Guardian"



4 Scannez le QR-Code de la personne porteuse du gilet



5 1/ Remplir les informations
2/ Cliquez "Save"



6 1/ Connexion terminé
2/ Enregistrez le QR-Code



NOTE IMPORATANTE

Vérifiez que l'utilisateur préalablement connecté à l'application S-AIRBAG application est configurée correctement.

 **DÉMARRAGE DE L'APPAREIL**

Vérifiez que l'utilisateur bien activer le gilet.

 **POSITION SATELLITE**

Vérifiez son positionnement satellite.

 **DISPOSITIF DE SIGNALISATION**

Affichage de l'état du signal de l'appareil

 **STATUS DE BATTERIE**


Affichage de l'état de la batterie.


SOS ALARME DE CHUTE

Morsque l'appareil déclenche une alarme, l'application associée reçoit l'alarme de l'appareil, y compris la localisation de l'alarme. Les membres de la famille associés peuvent prendre contact immédiatement ou prendre des mesures de sauvetage (cette option oblige les permissions d'envoi de notification push sur votre téléphone).

 **ALERTE DE DYSFONCTIONNEMENT**


En cas de dysfonctionnement de l'appareil, la marque s'affiche en rouge et un message d'erreur apparaît sur l'écran d'affichage. Lorsque l'écran est éteint, vous pouvez appuyer sur le bouton de dysfonctionnement pour réafficher le message d'erreur.

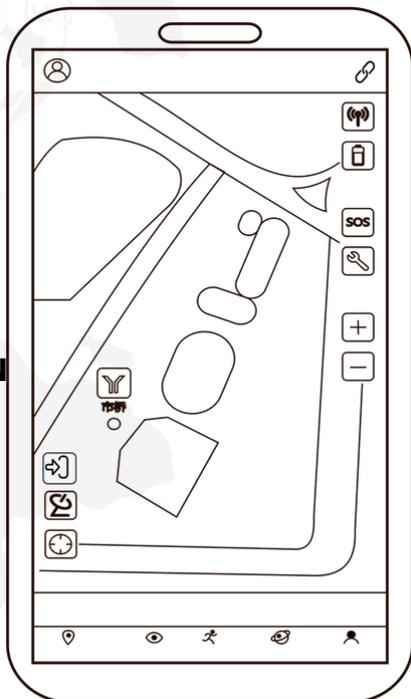

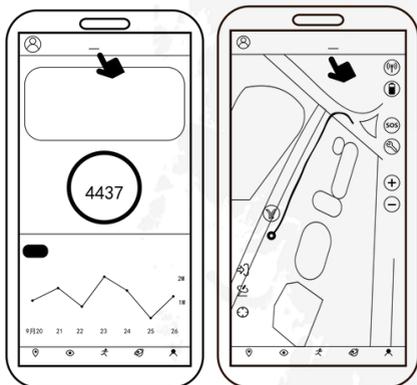

ALERTE DE DYSFONCTIONNEMENT

- 1/ Cliquez sur [Sports] pour savoir le nombre de pas effectué ce jour.
- 2/ Cliquez [Week/Month] pour modifier la durée, vous pouvez afficher l'historique sur les 7 jours.
- 3/ Cliquez [Sports]-[Track] pour voir le bilan.

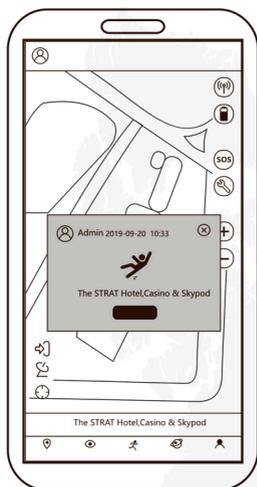


SOS ALARME

Lorsque le porteur tombe, l'airbag se déclenche pour protéger l'utilisateur. L'alarme SOS accompagnée d'un signal sonore s'affiche à l'écran et l'application associée affiche simultanément une page d'avis d'alarme. Entre-temps, le lieu de la chute et l'itinéraire de navigation optimal sont indiqués à la personne qui s'occupe de l'utilisateur pour qu'elle puisse porter secours immédiatement.

Les gonfleurs à l'intérieur sont destinés à déclencher les airbags en cas d'accident et ne sont utilisés qu'une seule fois. Une fois l'airbag déployé, les gonfleurs doivent être remplacés et les airbags doivent être repliés après chaque chute.

Vous pouvez également contacter votre revendeur agréé pour obtenir de l'aide si nécessaire. Veillez à remplacer les gonfleurs et à plier l'airbag correctement.

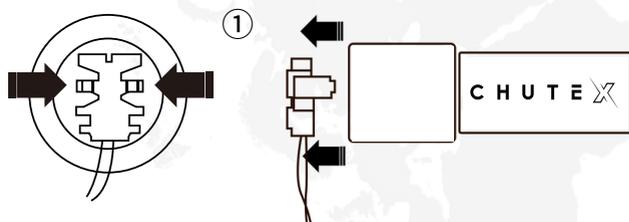

Étape 1 / Appuyer sur les deux extrémités de A et B et retirer simultanément le câble du terminal.




Étape 2 / Dévisser les deux gonfleurs dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.




NOTE IMPORANTE

Veillez à utiliser le même type de gaz de gonflage lorsque vous les remplacez après le gonflage.

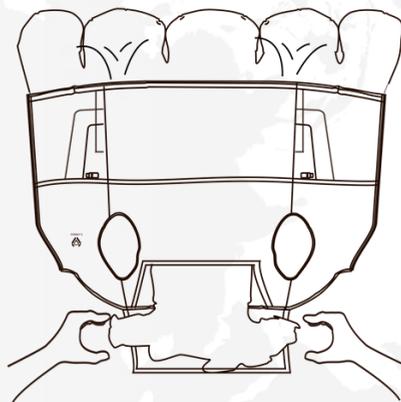


Etape 3 / Aplatir le gilet avec le côté intérieur vers le bas et le côté extérieur (côté du logo) vers le haut, presser le gaz depuis l'airbag de tête jusqu'à l'airbag de hanche.

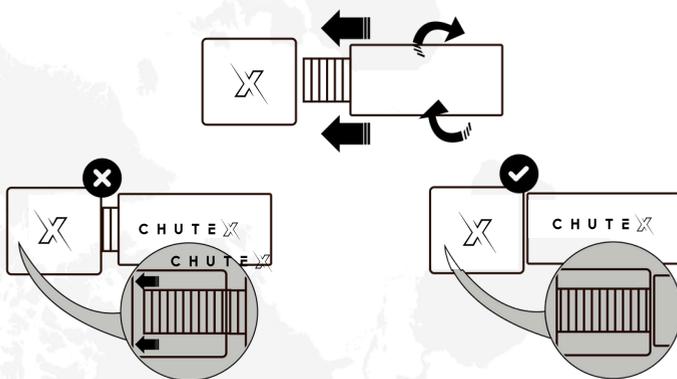


Etape 4 / Remplacer les nouveaux gonfleurs en les vissant dans le sens des aiguilles d'une montre.


Assurez-vous bien que les gonfleurs sont complètement vissés.

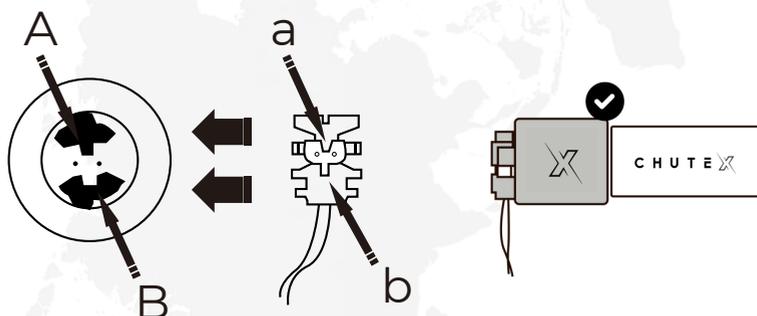



Etape 5 / Faire correspondre A à a, B à b, et brancher le câble du terminal.

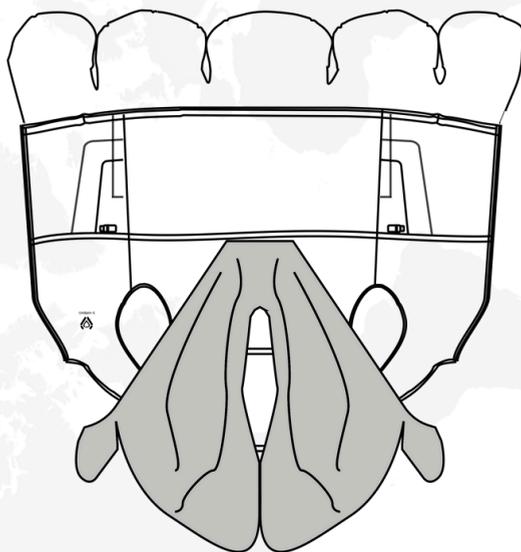


Etape 6 / Aplatir le gilet avec le côté intérieur vers le bas et le côté extérieur (côté du logo) vers le haut, aplatir la zone du coussin gonflable de la tête.

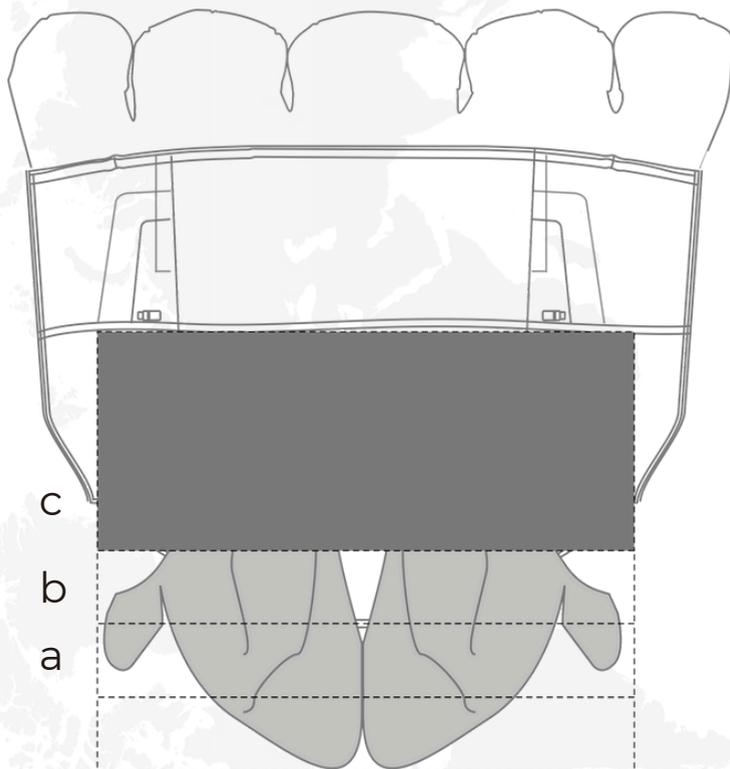


Etape 7 / Diviser l'airbag de la zone de la tête en deux parties, la moitié inférieure étant à nouveau divisée en trois parties plus petites.

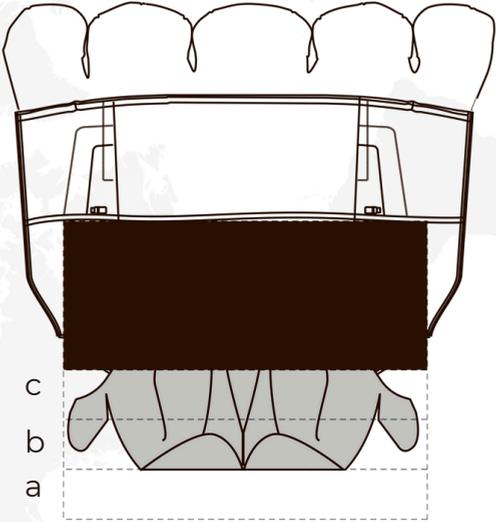
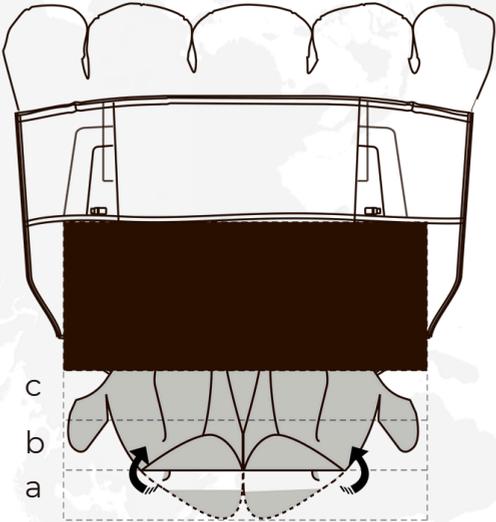


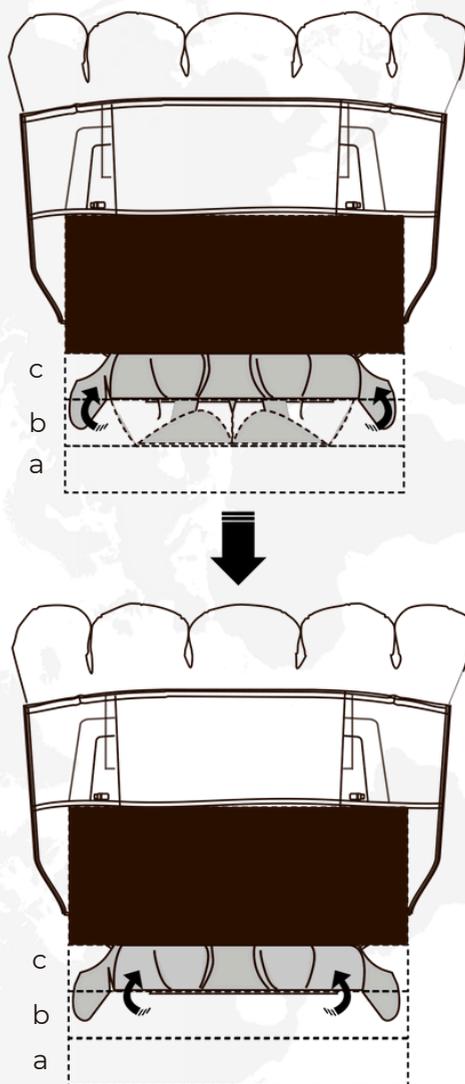



Etape 8 / D'abord replié la partie inférieure de l'airbag de la tête, de A à B, puis de B à C.

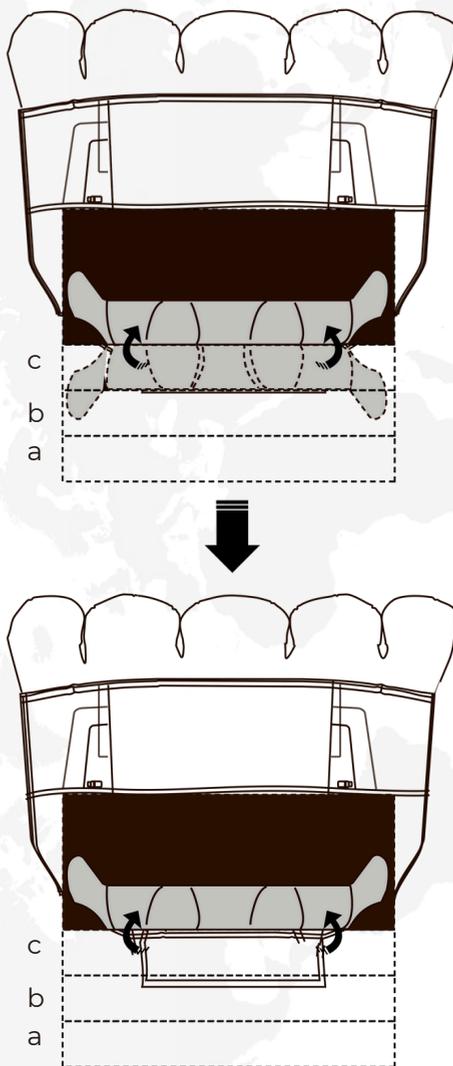



Etape 9 / Plier C sur la moitié supérieure du coussin gonflable de la zone de la tête.

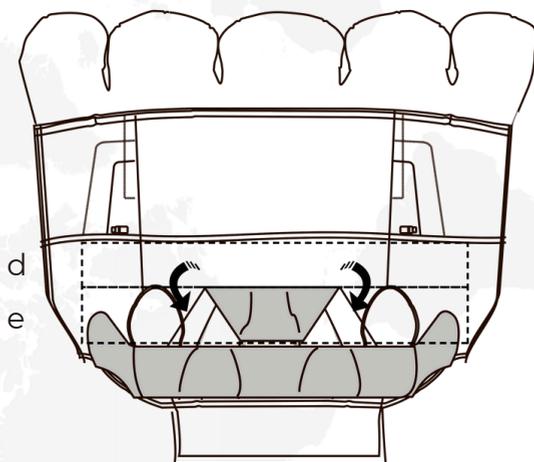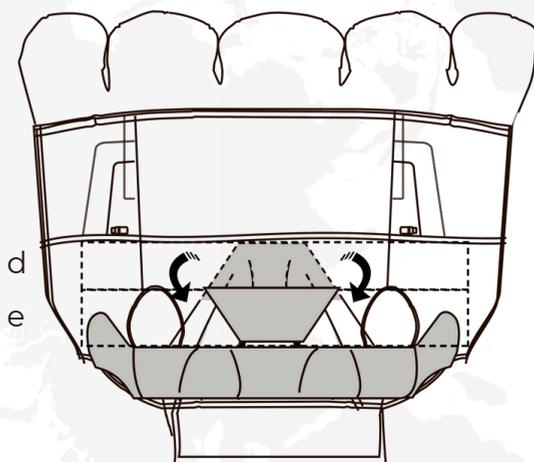



Etape 10 / Plier la partie supérieure du coussin gonflable de la zone de la tête de D à E.

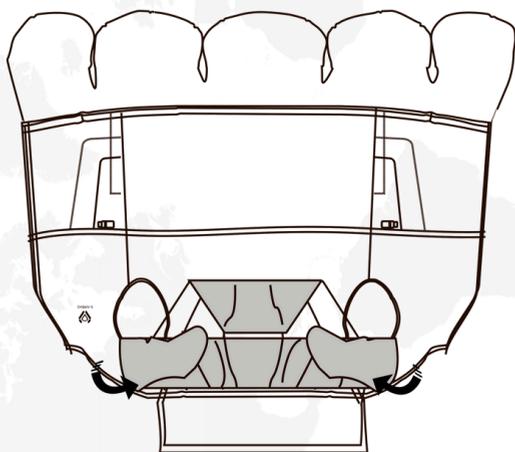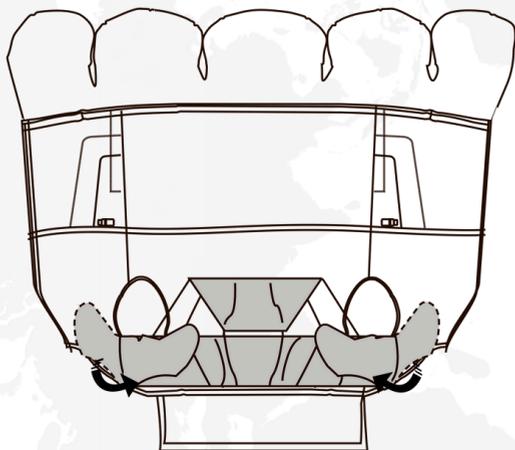


Etape 11 / Plier l'airbag supplémentaire de la tête de chaque côté.

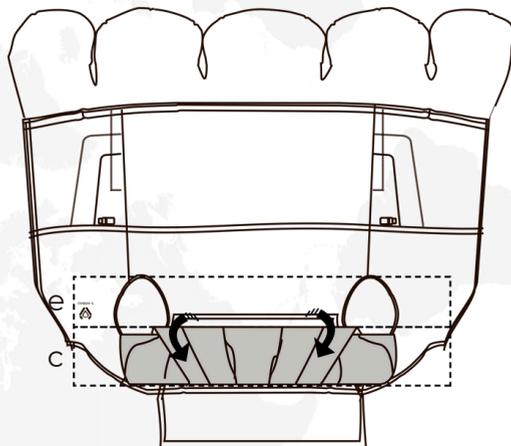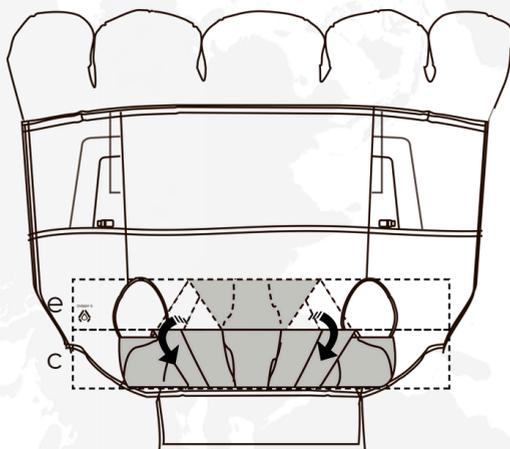



Étape 12 / Plier l'airbag de la partie E sur la partie C.

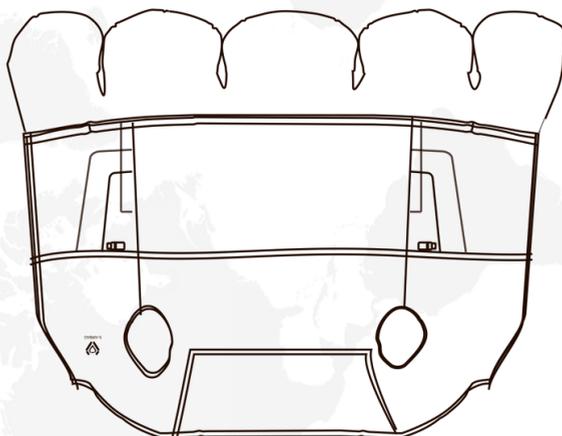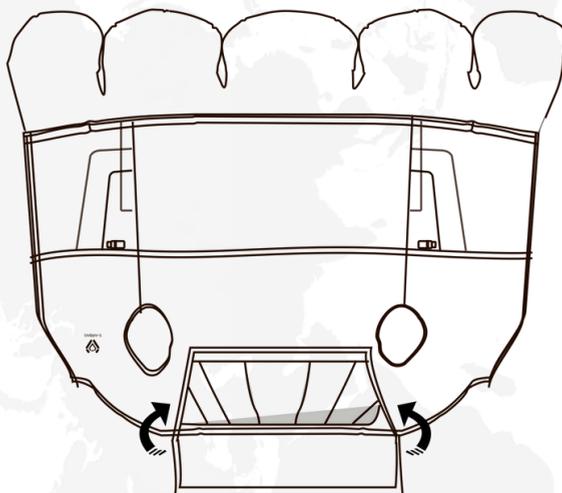



Etape 13 / Placer l'airbag tête replié dans le gilet et boucler les boutons-pression en conséquence.

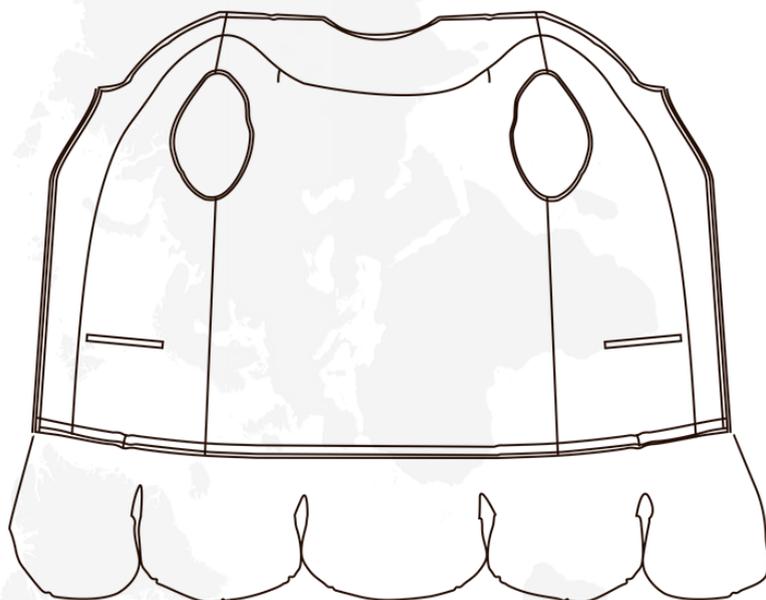



Etape 14 / Après avoir replié l'airbag de tête, tourner le côté intérieur de la veste vers le haut et le côté extérieur (côté du logo) vers le bas. Aplatir la veste et le coussin gonflable de la zone des hanches.

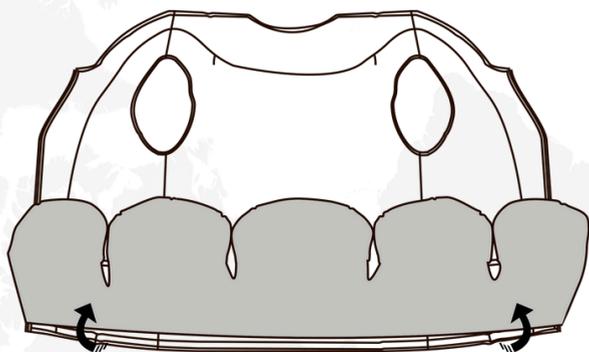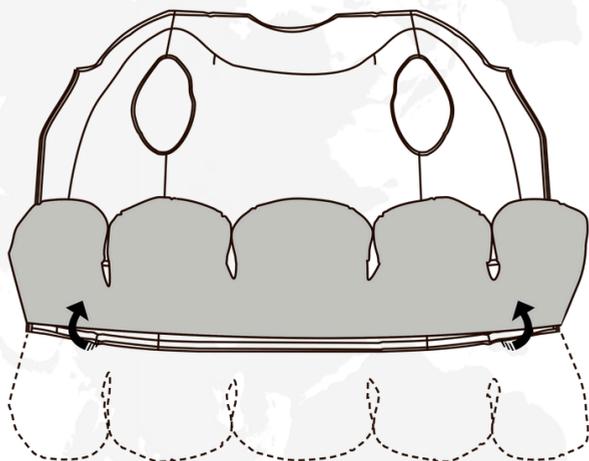


Etape 15 / Plier l'airbag de la zone des hanches vers le haut jusqu'à ce que le bas s'aligne avec le bas de la veste.

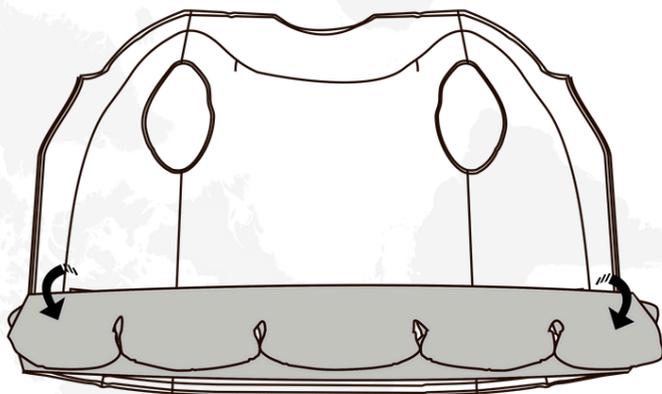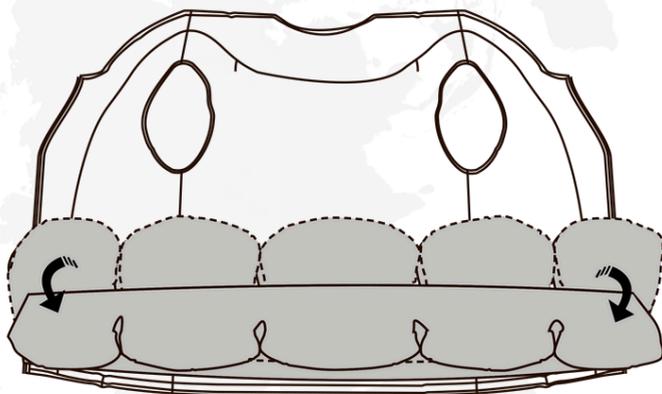

Etape 16 / Plier l'airbag de la zone des hanches vers le haut jusqu'à ce que le bas s'aligne avec le bas de la veste.

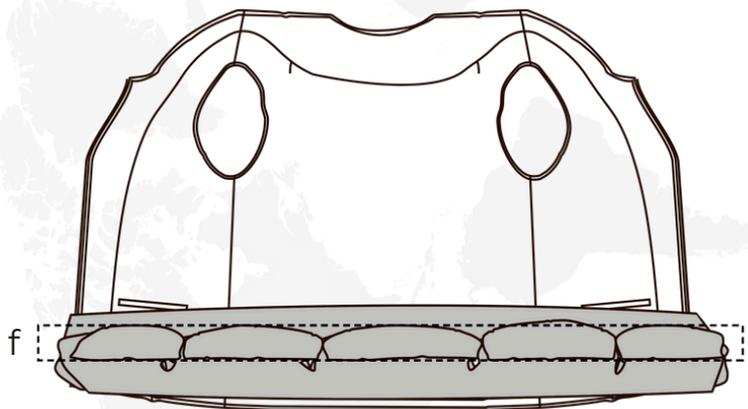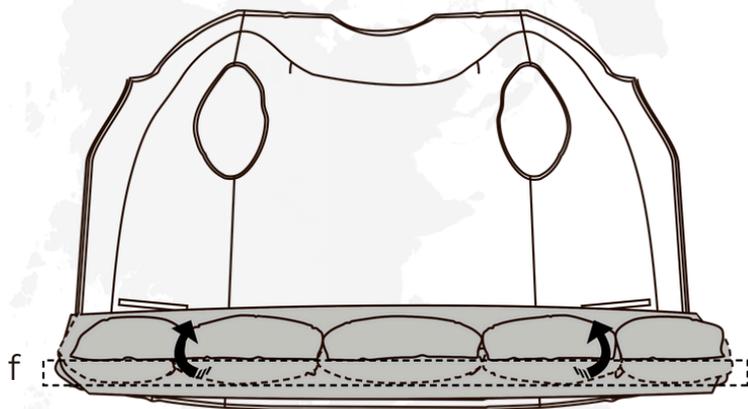

Étape 17 / rabattre la partie la plus petite du coussin gonflable de la zone des hanches vers le haut.

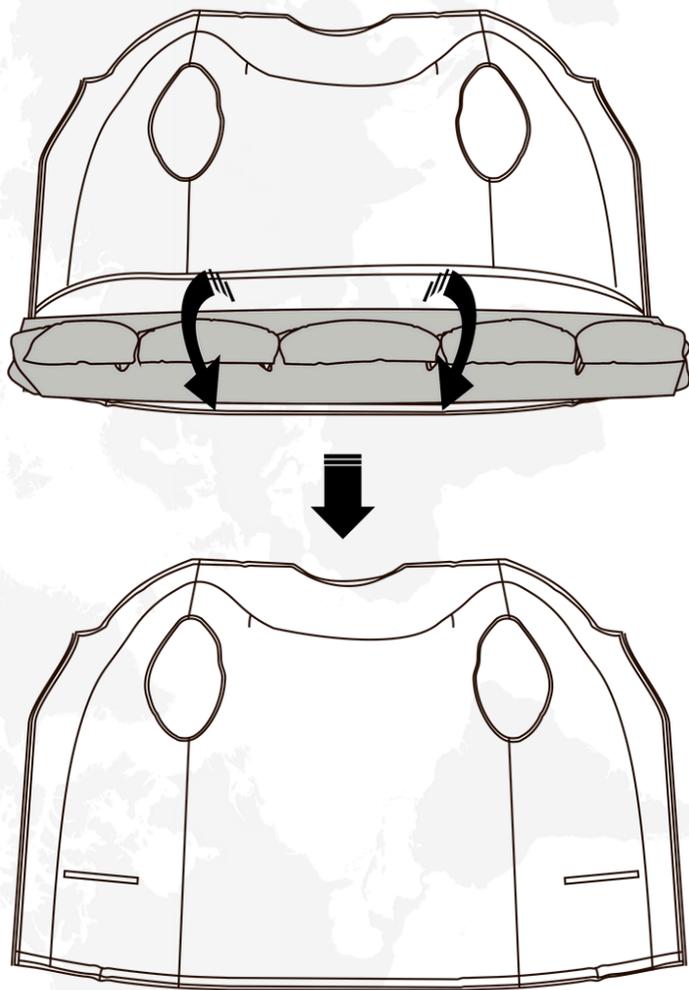

Etape 18 / Placer le coussin gonflable de la zone des hanches plié dans la veste et boucler les boutons-pression en conséquence.

Précautions à prendre avant d'utiliser la veste

Avant chaque utilisation, vérifiez que votre gilet est en bon état, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déchirures. En cas de dommage, veuillez nous contacter pour plus d'informations.

Attention après le déploiement de l'airbag

- Une fois que l'airbag est déployé, le gonfleur doit être remplacé par un nouveau gonfleur de même capacité.

Attention au stockage

- Ne démontez pas vous-même une partie quelconque de la structure interne de l'appareil.
- Cet appareil contient des pièces délicates et doit être manipulé avec précaution. Tenir hors de portée des enfants.
- N'utilisez que l'adaptateur électrique d'origine et tenez l'appareil à l'écart du feu, des autres sources de chaleur et des objets tranchants.
- Veuillez recharger complètement la batterie lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période.
- Gardez le bouton pression détaché lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez la batterie.
- À l'exception de la housse de la veste intelligente, les autres parties ne peuvent pas être lavées car elles contiennent une batterie. Veuillez la conserver séparément des autres articles.

Autre

- Ne portez pas l'appareil lorsque vous vous baignez ou que vous dormez.
- Pour éviter tout déclenchement accidentel lorsque vous prenez un véhicule, veuillez déboucler le bouton-pression ou retirer l'appareil.
- Ne pas coudre, repasser ou stocker quoi que ce soit sur la veste, car cela pourrait percer l'airbag et l'empêcher de fonctionner correctement.

Veillez à porter nos produits conformément aux instructions de notre guide de l'utilisateur, sinon la veste ne pourra pas se gonfler correctement.

1. Veillez à porter nos produits conformément aux instructions de notre guide de l'utilisateur.
2. Veuillez noter qu'aucun dispositif ne peut empêcher la mort ou des blessures graves dans certains accidents. Ce dispositif ne peut qu'absorber les chocs et offrir un certain soutien à la tête, au dos, aux hanches et au bassin, réduisant ainsi le risque de chute.
3. La protection du déclenchement de l'airbag est basée sur la chute de l'utilisateur dans une position debout normale ou en état de marche. Mais dans d'autres situations, par exemple si l'utilisateur tient la main courante pour tomber lentement ou s'il tombe en position assise ou accroupie, le dispositif peut ne pas déployer l'airbag en raison de sa faible vitesse de chute. L'airbag se déploie uniquement en cas de chute grave avec impact. Bien que ces types de chutes soient dévastateurs, ils ne représentent qu'un faible pourcentage de l'ensemble des chutes.
4. Pour les patients atteints d'ostéoporose sévère, des fractures peuvent survenir même en cas de collision légère. Il est donc recommandé de consulter un médecin pour éviter tout risque de blessure.
5. Il est recommandé de ne pas porter de vêtement ou de sac à dos par-dessus le gilet.
6. La veste ne protège que lorsque l'airbag est gonflé.
7. Veuillez prendre des mesures de protection appropriées pendant les périodes où vous ne portez pas le produit (y compris, mais sans s'y limiter, des mesures antidérapantes dans la salle de bains et des mesures de protection pour vous lever la nuit).
8. Lorsque vous utilisez les outils de transport, l'appareil ne peut pas être transporté.
9. Si vous pratiquez des sports intenses tels que la course à pied ou la danse, n'utilisez pas ce gilet car le capteur intégré du produit peut détecter que vous êtes sur le point de tomber et déployer l'airbag pour vous protéger. En outre, il n'est pas recommandé aux personnes porteuses d'appareils médicaux électroniques implantables tels que les stimulateurs cardiaques.
10. Le gilet ne sera en aucun cas tenu responsable de toute blessure corporelle ou de tout décès, et/ou de tout dommage matériel pouvant survenir lors d'une utilisation inappropriée des produits du gilet. Notre dispositif ne peut que réduire le risque de chute, mais ne peut pas empêcher la mort ou des blessures graves lors de certains accidents.

CHUTE X

MERCI DE VOTRE CONFIANCE

Nous vous remercions d'avoir choisi le Gilet Airbag Elder de Chutex. Nous espérons que ce guide d'utilisation vous a aidé à prendre en main votre équipement et à mieux comprendre son fonctionnement.

Notre mission est de vous offrir une protection fiable et de vous permettre de vivre chaque instant en toute sérénité. Si vous avez des questions, des suggestions, ou besoin d'une assistance supplémentaire, n'hésitez pas à contacter notre service client.

CONTACTEZ-NOUS

Email : contact@chutex-innovation.com

Téléphone : +33 4 77 02 29 37

Site internet : chutex-innovation.com

